

WAVICIDE 消毒注意事項

■消毒時間：

22°C 45 分鐘

■消毒劑使用期限

- 1.倒出之消毒液 30 天（倒出日期+29 天，不應超過原裝瓶上標示之保存期限）
- 2.開封之消毒液（在原裝瓶內）原裝瓶上標示之保存期限

■濃度測試：

1. 測試時機：**每使用日測試**，測試前請確認試紙在有效期限。
2. 試紙有效期限：開封後請在三個月內用完，開瓶後請在瓶身註明開瓶日期（若未及三個月已達效期，則使用至效期）
3. 試紙保存：保存在原來的瓶子內，需蓋緊瓶蓋、儲存在不會受到日曬的室溫中。
4. 濃度測試結果請登記於紀錄本，當濃度不足時，請更換消毒劑並在紀錄本上註記「更換消毒劑」。